

Produktbezeichnung: **Kolibri Mundschutz 3-lagig mit elastischen Ohrenschlaufen**

Klassifizierung: Klasse I gemäß Richtlinie MDD 93/42 EWG
Typ II, geprüft nach EN 14683:2005 für chirurgische Masken.


Produktbeschreibung: Latexfreie, allergiefreie, anatomisch geformte Gesichtsmaske mit Nasenbügel aus flexiblen Kunststoff. Die Innen- und Außenseite ist aus 100% glasfaserfreiem, blauem Vliesstoff, physiologisch unbedenklich und weichmacherfrei. Die innenliegende Filterschicht ist ebenfalls glasfaserfrei und hat eine Bakterienfilterleistung > 98 % gemäß EN 14683. Die elastischen Ohrenschlaufen bestehen aus Polyester und Elasthan.

Lagerung: Ohne direkte Sonneneinstrahlung, in Originalverpackung trocken lagern.

Max. Lagerfähigkeit: 5 Jahre

Entsorgung: Das Produkt kann thermisch verwertet oder auf Deponien entsorgt werden ohne giftige Stoffe freizusetzen. Bei kontaminierten Produkten bestimmt die Art und das Ausmaß der Kontamination die Entsorgung, dabei sind die geltenden Gesetze und Bestimmungen zu beachten.

Gebrauchsanleitung:

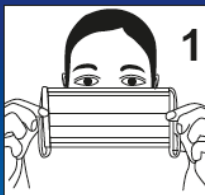


1
Halten Sie die Maske mit dem Nasenbügel nach oben, wobei das weiße Futter zu Ihnen zeigt.



2
Tragen Sie die Maske auf Nase und Mund auf und drücken Sie den Nasenbügel zusammen, um ihn Ihrer Nase anzupassen.



3
Ziehen Sie die Falten auseinander und legen Sie das untere Ende der Maske unter Ihr Kinn.

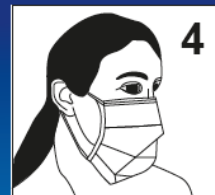

4
Um eine optimale Passform zu gewährleisten, drücken Sie den Nasenbügel fest zusammen.